

FD 333

Szybka dezynfekcja



FD 333 jest bezaldehydowym, gotowym do użycia roztworem do szybkiej dezynfekcji odpornych na działanie alkoholu powierzchni wyrobów medycznych (fotele stomatologiczne, stoliki obrotowe, tace na instrumenty, osłony do zdjęć wewnątrzustnych, uchwyty lamp oświetleniowych, itp.). Ponadto, jak podaje producent, środek FD 333 w stanie nieprzetworzonym może być stosowany do dezynfekowania zewnętrznych powierzchni produktów medycznych np. turbin, prostnic czy kątów. Preparat FD 333 nie niszczy czyszczonych powierzchni, jest nieszkodliwy dla środowiska naturalnego i ma przyjemny zapach.

Skład: 100 g FD 333 zawiera: 62 g etanolu, 0,05 g chlorku dwudecylo-dwumetylo-amonowego, substancje pomocnicze i wodę.

Zakres działania: Działanie bakteriobójcze, przeciw prątkom gruźlicy, grzybobójcze, wirusobójcze (wirusy otoczkowe, takie jak wirusy krowianki, łącznie z HBV, HCV i HIV¹⁾, SARS coronawirusy²⁾, oraz wirusy bezotoczkowe takie jak adenowirusy, poliomawirusy SV 40, poliovirusy, norowirusy). Lista VAH. Sprawdzony zgodnie z normami EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 16615.

1) Zgodnie z zaleceniem RKI (Instytutu Roberta Kocha) (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).

2) Kontrola obecności wirusa zastępczego BCV.

Zastosowanie: Roztwór FD 333 stosować bez rozcieńczania. Nanieść FD 333 na ściereczkę i całkowicie zwilżyć powierzchnię; małe, trudno dostępne miejsca spryskać bezpośrednio. Nasączone roztworem FD 333 chusteczki FD multi wipes oraz FD multi wipes compact stosować analogicznie. Przeznaczone do dezynfekcji miejsca i przedmioty całkowicie zwilżyć i pozostawić do wyschnięcia. Czas działania wynosi 1 minutę lub 0,5 - 60 minut (patrz tabela w „DE”) w wypadku działań wirusobójczych. Dalsze wskazówki patrz także – informacja o produkcie w Internecie.

Wskazówki: Tolerancja materiałów została zbadana i potwierdzona przez renomowanych producentów sprzętu medycznego. Zachować ostrożność w przypadku materiałów wrażliwych na działanie alkoholu (np. szkła akrylowego itp.). W przypadku powierzchni wrażliwych sprawdzić odporność materiału w niewidocznym miejscu.

Niebezpieczeństwo. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kon-

FD 333

Szybka dezynfekcja

taktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawartość/pojemnik dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

CE 0297