



3 korzyści

1

Maksymalne bezpieczeństwo

wysoka skuteczność czyszcząca eliminuje konieczność czyszczenia wstępnego i końcowego.

2

Większa trwałość instrumentów

inhibitory korozji wydłużają żywotność instrumentów.

3

Testowany w najbardziej wymagających warunkach

gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa nawet w przypadku silnego obciążenia organicznego.

PROSEPT® Instru

Wydajny koncentrat przeznaczony do bezpiecznej i skutecznej ręcznej dezynfekcji i czyszczenia instrumentów medycznych.

PROSEPT® Instru to koncentrat przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia instrumentów medycznych. Preparat zawiera innowacyjne połączenie środków aktywnych na bazie alkiloamin i czwartorzędowych związków amoniowych, dzięki czemu wykazuje szerokie spektrum działania i doskonałą moc czyszcząca. Zapewnia skuteczne usuwanie krwi, śliny i innych płynów bogatych w białko. PROSEPT® Instru nie wymaga dodatków i środków wzmacniających czyszczenie, nawet w przypadku intensywnych zanieczyszczeń. Substancje przeciwkorozyjne wydłużają żywotność instrumentów. Testy potwierdziły kompatybilność materiałową z polietylenem, silikonem, żelazem, stalą oraz szkłem akrylowym bez ryzyka odbarwienia lub wiązania krwi i białek na powierzchni instrumentu. PROSEPT® Instru można stosować w myjkach ultradźwiękowych. Specjalnie zaprojektowana nakrętka z podziałką objętości 10 ml i 20 ml zapewnia prostotę obsługi i wysoką dokładność dozowania. PROSEPT® Instru nie zawiera aldehydów i fenoli oraz ulega biodegradacji.

► Dlaczego

PROSEPT® Instru jest tak skuteczny?

Zawartość w 100 g: 8,9 g alkiloaminy, 3,6 g chlorku dialkilo-dimetylo-amonowego, dodatek wzmacniający czyszczenie, substancje pomocnicze.

Właściwości fizyczne: Przezroczysta, niebieska ciecz o charakterystycznym zapachu.

Gęstość (20°C): 1,0 g/ml (g/cm³)

Wartość pH: Koncentrat: 12,5; 2% roztwór roboczy: 11,0

► Powierzchnia wolna od zarazków w kilka minut

Bakteriobójczy /	0.5% w 15 min
Grzybobójczy (<i>C. albicans</i>)	
Gruźliczobójczy (<i>M. terrae</i>)	2% w 60 min
WZW typu B ¹⁾ / HIV	
(bez obciążenia organicznego)	2% w 15 min
(z obciążeniem organicznym)	4% w 5 min
	2% w 30 min
	4% w 15 min
BVDV / WZW typu C ²⁾	0.5% w 5 min
Adenowirus	2% w 120 min
	3% w 60 min

1) Test na obecność przeciwciał HBsAg; 2) Test na obecność wirusa zastępczego BVDV

► Łatwe zastosowanie

zgodnie z prostymi wytycznymi:

1. Ze względów bezpieczeństwa nosić rękawice gospodarcze i okulary ochronne.
2. Przygotować roztwór roboczy zgodnie instrukcją na etykiecie. Użyć podziałki objętości wewnątrz nakrętki, aby zapewnić właściwe dozowanie.
3. Całkowicie zanurzyć instrumenty. Przed zanurzeniem rozmontować instrumenty na części.
4. Całkowicie usunąć powietrze ze wszystkich otworów.
5. Przestrzegać czasu działania.
6. Po dezynfekcji dokładnie spłukać instrumenty wodą i osuszyć.
7. Przygotowywać świeży roztwór roboczy co najmniej 2-3 razy w tygodniu, w zależności od stopnia zabrudzenia. Roztwór najlepiej przygotowywać codziennie.
8. Przed pierwszym zastosowaniem wykonać próbę materiałową.
9. Nie stosować na stopach aluminium i przedmiotach typu strzykawki Citoject.

► Ważne

ze względów bezpieczeństwa

Powoduje oparzenia. Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

► Doskonałe referencje

Eksperti polecają

Prof. Dr. med. Dr. h.c. H.-G. Sonntag, Heidelberg, D, 2004; Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwenningen, D, 2002, 2004; Dr. J. Steinmann, Bremen, D, 2003

Zgodność z metodami standardowymi DGHM, normami EN 1040, EN 1275 (*C. albicans*); uwzględniono w wykazie DGHM / VAH





Dezynfekcja instrumentów

Kiedy stosować

- ▶ Instrumenty zdezynfekować bezpośrednio po użyciu.

Ważne wytyczne

- ▶ Ostrożnie umieścić instrumenty na tacy - nie rzucać. Podczas upadku może dojść do uszkodzenia stopu instrumentów, co negatywnie wpłynie na ich funkcjonalność i trwałość.
- ▶ PROSEPT® Instru nie jest przeznaczony do dezynfekcji produktów z żeliwa lub odlewanych aluminium, np. strzykawki Citoject.
- ▶ Instrumenty niestabilne termicznie nie mogą być poddawane sterylizacji w autoklawie. Odpowiednie metody sterylizacji określa producent.
- ▶ Instrumenty, które nie mogą być poddawane sterylizacji, po dezynfekcji należy przechowywać w opakowaniach ochronnych.
- ▶ Instrumenty obrotowe należy dezynfekować przy użyciu PROSEPT® Burs, ponieważ w przypadku nadmiernego narażenia na roztwory wodne może dojść do stępienia krawędzi.
- ▶ Maksymalny czas przechowywania roztworu roboczego wynosi 7 dni. Zaleca się codzienną wymianę roztworu, w zależności od stopnia zanieczyszczenia.

Wskazówka

- ▶ Moc czyszcząca PROSEPT® Instru można zwiększyć przy zastosowaniu urządzenia ultradźwiękowego. Każdorazowo należy sprawdzić, czy instrumenty są kompatybilne z falami ultradźwiękowymi.

Materiały i wyposażenie

- ▶ Rękawice gospodarcze
- ▶ Okulary ochronne
- ▶ Wanienka do dezynfekcji
- ▶ Szczypce
- ▶ Rozpuszczalny w wodzie marker

PROSEPT® Instru

Zastosowanie

Wydajny, płynny koncentrat przeznaczony do ręcznej dezynfekcji i czyszczenia instrumentów medycznych.



1. Stosować rękawice gospodarcze i okulary ochronne.



2. Przygotować roztwór preparatu dezynfekującego w wanience do dezynfekcji. Z 90 ml koncentratu przygotować 3 litry roztworu roboczego (3%).
3. Na wanience do dezynfekcji umieścić następujące informacje: użyty produkt, stężenie, data przygotowania, podpis.
4. Wanienkę zamknąć pokrywą i trzymać zamkniętą do ponownego użyciu.



5. Natychmiast po użyciu instrumenty umieścić na ociekaczu. Rozmontować instrumenty i otworzyć wszystkie złącza. Unikać zaschnięcia zabrudzeń. Używanie szczypiec podczas dezynfekcji instrumentów zmniejsza ryzyko urazu i infekcji.



6. Ociekacz umieścić w wanience do dezynfekcji. Gdy ociekacz jest zanurzony, sprawdzić, czy nie tworzą się pęcherzyki powietrza.



7. Odczekać wymagany czas działania.
8. Wyjąć ociekacz z wanienki do dezynfekcji. Dokładnie spłukać instrumenty wodą.
9. Osuszyć instrumenty ściereczką jednorazowego użytku.
10. Sprawdzić, czy na instrumentach nie występują widoczne zanieczyszczenia.
11. W razie konieczności oczyścić instrument ręcznie i powtórzyć etapy 5 - 10. Aby usunąć trudne plamy lub silne zanieczyszczenia, zastosować czyszczenie w kąpielii ultradźwiękowej z zastosowaniem PROSEPT® Instru lub Sonic.



12. Sprawdzić instrumenty pod kątem funkcjonalności i widocznych uszkodzeń.
13. W razie konieczności nasmarować.
14. Umieścić instrumenty w autoklawie i poddać sterylizacji.
15. Zaznaczyć datę sterylizacji, termin ważności, numer wsadu i zawartość.
16. Po sterylizacji sprawdzić, czy opakowania nie są naruszone. W przypadku uszkodzenia należy powtórzyć proces sterylizacji.
17. Podczas przechowywania chronić przed kurzem, aerozolami i wilgocią.